

Lentilles Menicon en Matériau Z		$\emptyset_T$	$K-K' < 0.20 \text{ mm}$	$0.20\text{mm} \leq K-K' \leq 0.40 \text{ mm}$	$0.40\text{mm} < K-K' \leq 0.50 \text{ mm}$
<b>S</b>	<b>Menicon EX-Z</b> Sphéro-asphérique	8.80	$r_0 = K - 0.05$	$r_0 = K - 0.10$	$r_0 = K - 0.15$
		9.20	$r_0 = K$	$r_0 = K - 0.05$	$r_0 = K - 0.10$
		9.60	$r_0 = K + 0.05$	$r_0 = K$	$r_0 = K - 0.05$
		10.00	$r_0 = K + 0.10$	$r_0 = K + 0.05$	cf Ass. Technique
		10.50	$r_0 = K + 0.15$	$r_0 = K + 0.10$	cf Ass. Technique
		11.00	$r_0 = K + 0.05$	$r_0 = K$	cf Ass. Technique
<b>P</b>	<b>Menicon Z-<math>\alpha</math></b> Sphéro-asphérique	8.80	$r_0 = K + 0.05$	$r_0 = K$	$r_0 = K - 0.05$
		9.20	$r_0 = K + 0.10$	$r_0 = K + 0.05$	$r_0 = K$
		9.60	$r_0 = K + 0.15$	$r_0 = K + 0.10$	$r_0 = K + 0.05$
		10.00	$r_0 = K + 0.20$	$r_0 = K + 0.15$	cf Ass. Technique
		10.50	$r_0 = K + 0.25$	$r_0 = K + 0.20$	cf Ass. Technique
		11.00	$r_0 = K + 0.30$	$r_0 = K + 0.25$	cf Ass. Technique
<b>Menicon Z</b> Le diamètre 9.00 à 9.80 mm est fonction du rayon			$r_0 = K + 0.10$	$r_0 = K$	$r_0 = K - 0.10$

*K : Rayon cornéen le plus plat K' : Rayon cornéen le plus serré*

## Pensez aux grands diamètres

- En cas de lentilles inconfortables
- Pour résoudre une adaptation

(Syndrome 3 heures - 9 heures, warpage, post-chirurgie, post-greffe, kératocône décentré...)

Pour plus de confort... Entretien avec MeniCare Plus au quotidien / Progent une fois par semaine

Article: [ Edit ]

Preview Save Apply Close

Title	Published	No	Yes	Article ID:	2
Alias	Front Page	No	Yes	State	Published
Section				Hits	157

[show/hide]

Font family Font size icon ABC

Rich text editor toolbar with icons for bold, italic, underline, font color, background color, bulleted list, numbered list, link, unlink, image, etc.

### Tableaux règles d'adaptation

LRPO sphériques



LRPO toriques et multifocales



### Arbre décisionnel

Lentilles Menicon pour astigmatés



Path: div.table » div.rows3 » div.icon

Image Pagebreak Read more... Add attachment

Image Manager : 1.5.6

Image Rollover Advanced

**Properties**

URL

Alternate Text

Dimensions x Proportional

Alignment --Not Set-- Clear --Not Set--

Margin Top Right Bottom Left Equal Values

Border Width --Not Set-- Style --Not Set-- Color

**Browse**

Current directory is: /icons/outils\_aide\_adaptation ( 0 folders, 0 files )

Click on a file name to insert, click to the right of the name to view its properties. CTRL+Click selects multiple files.

Folders	Details
<ul style="list-style-type: none"> <li>Root</li> <li>audio</li> <li>banners</li> <li>cqi</li> <li>cristal-bot</li> <li>downloads</li> <li>events</li> <li>food</li> <li>fruit</li> <li>icons</li> <li>Products</li> <li>outils_aide_adaptation</li> <li>Letter</li> </ul>	No files

Preview: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Parameters (Article)

Author	Administrator
Author Alias	
Access Level	Public
Created Date	
Start Publishing	
Finish Publishing	

Parameters (Advanced)

Additional Information