

Règles d'adaptation

Lentilles Menicon en Matériau Z		\varnothing_T	$K-K' < 0.20 \text{ mm}$	$0.20\text{mm} \leq K-K' \leq 0.40 \text{ mm}$	$K-K' > 0.40 \text{ mm}$		
Toriques	Menicon Z BTC Torique interne	9.10			$r_0 \text{ plat} = K \quad r_0 \text{ serré} = K' + 0.15$		
		9.60					
		10.10					
	Menicon Z BT Bitorique	9.10			$r_0 \text{ plat} = K \quad r_0 \text{ serré} = K' + 0.15$		
		9.60					
		10.10					
	Menicon Z FT Torique externe	9.10			$r_0 = K + 0.05$	$r_0 = K$	
		9.60					
		10.10					
Multifocales	Menifocal Z Concentrique Vision Alternée	9.60	$r_0 = K + 0.05$	$r_0 = K$			
		9.80					
	Menicon Z Executive Segmentée Vision Alternée	9.10	$r_0 = K + 0.05$	$r_0 = K$			
		9.60					
		10.10					
	Menicon Z Progressive et *Z Progressive + Progressive Vision Simultanée VL Centrale	9.10	$r_0 = K + 0.05$	$r_0 = K$			
		9.60					
		10.10					
	Menicon Z Progressive BTC Progressive Torique Interne Vision Simultanée	9.10			$r_0 \text{ plat} = K \quad r_0 \text{ serré} = K' + 0.15$		
		9.60					
10.10							
Menicon Z Progressive BT Progressive BiTorique Vision Simultanée	9.10			$r_0 \text{ plat} = K \quad r_0 \text{ serré} = K' + 0.15$			
	9.60						
	10.10						
Menicon Z Progressive Near VP Centrale pour œil non dominant Vision Simultanée	9.10	$r_0 = K$	$r_0 = K - 0,05$				
	9.60						
	10.10						

K : Rayon cornéen le plus plat K' : Rayon cornéen le plus serré

*Disponible aussi en version BTC et BT

ASSISTANCE TECHNIQUE

Tel. : 01 41 40 19 41 - Fax : 01 41 40 19 20
atechnique@menicon-france.fr

FORMATION

Michaël Guez : Tel. : 01 41 40 19 14 - Fax : 01 41 40 19 16
formation@menicon-france.fr